



Instructions pour l’emballage et l’envoi des cadavres pour le diagnostic de la rage:

Règles générales:

- Envoyer l’animal le plus rapidement possible. Envoi du cadavre entier soit seulement la tête. Ne pas congeler l’animal.
- Les animaux doivent être emballés de manière d’empêcher tout écoulement des liquides ou émissions d’odeur, soit **principe d’emballage à trois couches**:
 1. Poser le cadavre dans un **sac imperméable** (sac à ordures ou sac en plastique plus fort) et bien le ficeler. S’il y en a plusieurs, poser chaque cadavre dans un sac individuel et marquer clairement chaque sac.
 2. Étaler **du matériel absorbant** (mouchoir, essuie-tout; pour absorber le liquide) dans un **deuxième sac imperméable** et poser le premier sac à l’intérieur du deuxième. Bien ficeler le deuxième sac aussi.
 3. Comme couche finale, utiliser un **emballage rigide** (soit une boîte de plastique étanche, soit une boîte en carton rempli avec du matériel absorbant. Ne JAMAIS utiliser une enveloppe courrier!). Remplir le **rapport d’accompagnement** complètement et le poser entre le deuxième sac et la couche extérieure. Ne jamais poser le rapport près du cadavre!
 4. Indiquer que le colis contient du matériel diagnostique en étiquetant le paquet avec le signe „**UN 3373**, Biologischer Stoff, Kategorie B“ ci-dessous. Envoyer le paquet en **courrier express**. (le Courrier A pour les colis peut durer 2-3 jours!).

